


Hernik

KÄYTTÖOHJE

IPAI **NXT**



versio: 01-2019

SISÄLLYSLUETTELO

I. Yleistietoja

1.1	Johdanto	2
1.2	Käyttötarkoitus ja indikaatio	2
1.3	Tärkeätä tietoa	3
1.4	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	3
1.5	Takuu	3
1.6	Huolto ja korjaukset	3
1.7	Käytännöllisiä ohjeita	3
1.8	Asentaminen autoon	4
1.9	Päästuen säätäminen	4
1.10	Kolmipistevyön käyttäminen	5

II. Turvaohjeet

2,1	Turvaohjeet	7
-----	-------------	---

III. Perusistuimen käsittely ja toiminnot

3.1	Sisäisen 5-pistevyön säätäminen	8
3.2	Erillisten säätösolkien käyttäminen	8
3.3	Selkänöjan korkeuden säätäminen	9
3.4	Selkänöjan kallistuksen säätäminen	9

IV. Lisävarusteiden käyttäminen

4.1	ISOFIX-adapteri	10
4.2	Kiristystanko	11
4.3	Turvapöytä	12
4.4	Sivutuet	12
4.5	Loitonnuskiila	13
4.6	Kallistussäätö	13
4.7	Jalkatuki / jalkarulla	14
4.8	Sarana-adapteri	14
4.9	Suojamatto	15
4.10	Rintakehähihnojen kiinnitysvyöt	15

V. Takuu

16

VI. Merkinnät

16

VII. Kunnossapito & hoito

16

Suojapäällisen irrotus

17

VIII. Tekniset tiedot

18

I. Yleistietoja

1.1 Johdanto

Auton turvaistuimen IPAI-NXT valittuanne olette saaneet käyttöönnne korkealaatuisen tuotteen. Haluamme kiittää luottamuksestanne tuotteisiimme.

Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa, että tuotteesta on iloa ja se toimii jokapäiväistä elämää helpottaen. Käyttöohjeessa annetaan ohjeet oikeaan ja vaivattomaan käyttöön sekä tarvittavaan hoitoon ja kunnossapitoon. Ohjeet tulee lukea huolellisesti vääränlaisen käytön aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi ja parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi. Mikäli teillä on kysyttävää tai ilmenee ongelmia, kääntykää jälleenmyyjän puoleen. Toivomme, että tuotteemme toimii ongelmattomasti ja täyttää odotuksenne.

Varamme oikeuden teknisten muutosten tekemiseen tässä käyttöohjeessa kuvattuun versioon. Ennen asentamista autoon ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea sivuilla 4-6 olevat ohjeet ja noudatettava niitä. Varmistakaa, että käyttöohjeet pidetään tuotteen mukana, jolloin ne ovat aina jokaisen istuinta käyttävän henkilön saatavilla.

Kunnioitten

HERNIK GmbH

1.2 Käyttötarkoitus ja indikaatio

IPAI-NXT on kehitetty erityislasten kuljettamiseen autoissa. Lapsille, joilla on heikko pään tai vartalon hallinta (esim. CP-vamma, lihasdystrofia, hypotensio), voidaan tarjota asentotukea yksilöllisesti sijoitettujen rintakehätyynyjen sekä erikoispehmusteiden avulla, jotka varmistavat turvallisen kuljettamisen.

Erityistarpeiden yhteydessä voidaan käyttää erityisiä lisävarusteita, kuten: istuinkallistusta tai tukevan abduktiokiilan tai jalkarahin asentaminen. Lisätietoja luvussa IV.

I. Yleistietoja

1.3 Tärkeätä tietoa

IPAI-NXT -turvaistuin liikuntarajoitteisille lapsille koostuu kahdesta moduulista:

1. Perusistuin Römer-Britaxilta (ks. valmistajan käyttöohjeet).
2. Sovitusmoduuli varusteineen, joka antaa mahdollisuuden varustaa turvaistuin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Huomioikaa käyttöohjeet HERNIK GmbH:lta.

1.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HERNIK GmbH vakuuttaa vastuullisena valmistajana "IPAI-NXT":n täyttävän olennaiset vaatimukset (direktiivin 93/42 EEC liite 1). Tuote on mainitun direktiivin mukaisesti varustettu CE-merkinnällä.

1.5 Takuu

Takuu on voimassa ainoastaan mikäli tuotetta on käytetty määrättyissä olosuhteissa ja oikeisiin käyttötarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisten komponenttien ja varaosien aiheuttamista vaurioista, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.

1.6 Huolto ja korjaukset

IPAI-NXT -tuolin huolto ja korjaukset kuuluvat yksinomaan apuvälineiden jälleenmyyjän suoritettaviksi. Mikäli ilmenee ongelmia, kääntykää jälleenmyyjän puoleen. Korjauksia varten toimitetaan ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

1.7 Käytännöllisiä ohjeita

Turvaistuin toimitetaan täysin koottuna. Toimituksen yhteydessä jälleenmyyjä neuvoo käyttäjää välineen käyttöön käyttöohjeen avulla. Jälleenmyyjän tulee asentaa turvaistuin autoon yhdessä käyttäjän kanssa ja mikäli mahdollista, säätää Isifix-hihna tai kiristin.


Turvaistuinta paikalleen asennettaessa on parasta pidellä sitä edestä keskeltä yhdellä kädellä ja ylhäältä toisella. Optimaalisen istuma-asennon saavuttamiseksi on turvaistuin säädettävä yksilöllisesti lapsen vaatimusten mukaiseksi. Tämä kuuluu aina jälleenmyyjän tehtäväksi.

I. Yleistietoja

1.8 Asentaminen autoon

Aseta turvaistuin ajoneuvon istuimelle. Varmista, että selkänoja (07) nojaa tasaisesti ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.

Vinkki! Mikäli ajoneuvon istuimen päätuki on häiritsevästi tiellä, se tulee poistaa.

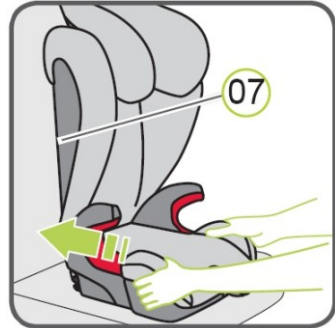

1.9 Päätuen säätäminen



1. Oikein säädetty päätuki (05) varmistaa auton olkavyön (kolmipistevyö) optimaalisen kulun ja tarjoaa lapselle mahdollisimman hyvän tuen. Päätuksi (5) on säädettävä siten, että lapsen olkapäiden ja päätuen (05) väliin jää kahden sormenleveyden mittainen väli. Tämä mahdollistaa päätuen korkeuden säätämisen lapsen pituuden mukaiseksi:

2. Tartu päätuen (05) takana olevasta säätökahvasta (06) ja vedä ylöspäin. Päätuksi on nyt vapautettu lukituksesta.

3. Päätuksi (05) voidaan nyt työntää halutulle korkeudelle. Kun säätökahva (06) vapautetaan, päätuki (05) lukittuu paikalleen.

4. Aseta lapsen turvaistuin ajoneuvon istuimelle.

5. Lapsi voi nyt mennä istumaan turvaistuimeen, tarkista korkeus. Toista menettely, kunnes päätuki (05) on oikealla korkeudella.

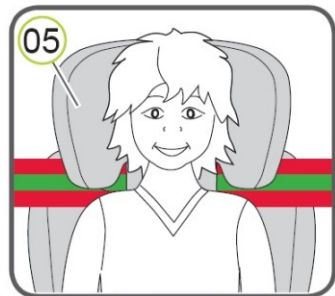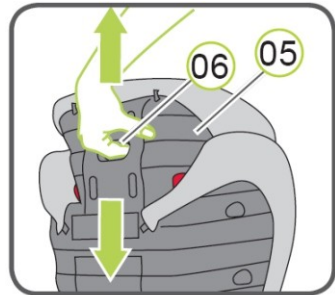


I. Yleistietoja

1.10 Kolmipistevyön käyttäminen (Gr. III)

Kolaritilanteessa syntyvien valtaviin voimien vaimentamiseksi IPAI-NXT on kiinnitettävä ajoneuvon kolmipistevyöllä säädösten ECE 44, R 14 ja R 16 mukaisesti. ISOFIX-kiinnitys yksin ei ole riittävä.

1. Aseta lapsi turvaistuimeen - ideaalisesti istuinta 90° kääntämällä (lisävaruste: sarana-adapteri).

2. Vedä auton turvavyö esiin ja liitä se (lapsen etupuolelta) turvavyön solkeen (19).

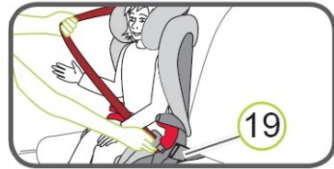

VAARA! Varmista, ettei auton turvavyö ole kiertynyt, sillä muussa tapauksessa kiinnitysjärjestelmän täyttä suojavaikutusta ei enää saavuteta.

3. Lukitse vyön kieli vyönlukkoon (19) siten, että kuulu klikkausääni.



4. Aseta olkavyö (18) ja lantiovyö (17) autonistuimen vyölukon (19) puolelle istuintyyntyn vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (01).

VAARA! Autonistuimen vyölukko (19) ei saa olla vaaleanpunaisen vyönohjaimen (01) ja käsinojan välissä.

5. Aseta lantiovyö (17) istuintyyntyn toiselle puolelle vaaleanpunaiseen vyönohjaimen (01).

VAARA! Lantiovyön (17) on kuljettava mahdollisimman alhaalla lapsen lonkkien yli molemmilla puolin.



I. I. Yleistietoja


6. Työnnä lantiovyö (18) päätuen (05) tummanpunaiseen vyönkannattimeen (02), kunnes se on kokonaan ja kiertymättömänä kannattimessa (02).

Vinkki! Mikäli selkänoja (07) peittää kannattimen (02), voidaan päätukea (14) säätää ylöspäin. Olkavyön (18) kiinnittämisen jälkeen päätuki (05) voidaan säätää takaisin oikealle korkeudelle.



7. Varmista, että olkavyö (18) kulkee lapsen solisluun yli eikä kosketa kaulaa.

Vinkki! Päätuen (05) korkeutta voidaan säätää myös istuimen ollessa autossa.

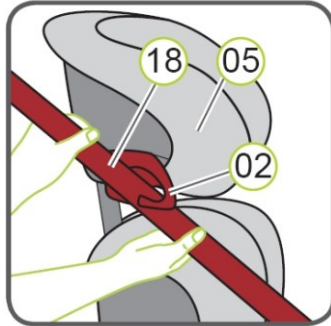

Tarkista aina ennen ajoon lähtöä, että ...

- ▶▶ lapsen turvaistuin on tukevasti kiinni;
- ▶▶ lantiovyö (17) kulkee istuintyynyn molemmilla puolin vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (01),
- ▶▶ olkavyö (18) kulkee istuintyynyn molemmilla puolin vaaleanpunaisissa vyönohjaimissa (01),
- ▶▶ olkavyö (18) kulkee soljen (19) puolella myös istuintyynyn vaaleanpunaisen vyönohjaimen
- ▶▶ olkavyö (18) kulkee viistosti selkänojaan,
- ▶▶ vyöt ovat kireällä eivätkä ole kiertyneet,
- ▶▶ auton kiinnityssolki (19) ei ole istuintyynyn vaaleanpunaisessa vyönohjaimessa (01).



II. Turvaohjeet

- Ennen käyttöä on aina tarkistettava, että komponentit toimivat moitteettomasti ja ovat kunnossa.
 - Käyttöohjeet tulee aina pitää turvaistuimen mukana.
 - Lapsen turvallisuus on taattu vain mikäli istuin on asennettu oikein ja lapsi tuettu siihen asianmukaisesti.
 - Vyöt on kiristettävä tiukalle eivätkä ne saa olla kiertyneet.
 - Kolmipisteturvavyö on sijoitettava kulkemaan vyönohjaimien läpi ja sen tulee ympäröidä istuin tiukasti.
- Tarkista, että:
- A) turvavyö on tukevasti paikallaan vyönohjaimessa
 - B) vyönsoljet on tukevasti lukittu
 - C) kangasta ei ole jäänyt väliin
- Varmista, että lapsen ja istuinvyön väliin ei jää mitään kiinteitä esineitä kuten niittejä tai vyönsolkia yms. Ne voisivat johtaa loukkaantumiseen onnettomuustapauksessa.
 - Selitä lapselle, miten tärkeätä on olla hyvin tuettuna ja että vöiden paikka ei muutu. Lapsi ei saa vetää vöistä eikä avata vyönsolkia.
 - Istuimeen ei saa tehdä mitään muutoksia, sillä ne voivat vaarantaa lapsen turvallisuuden.
 - Auton liikkuvat osat tai oviaukon läpi siirtäminen eivät saa vaurioittaa istuinta.
 - Lasta ei milloinkaan tule jättää yksin turvaistuimeen valvomatta.
 - Neuvokaa matkustajia tavasta, jolla lapsi voidaan ottaa pois istuimesta onnettomuuden jälkeen.
 - Lapsen turvaistuin on vaihdettava uuteen onnettomuuden jälkeen.

III. Perusistuimen käsittely ja toiminnot

3.1. Sisäisen 5-pistevyön säätäminen

Valitse ensin toinen kahdesta mahdollisesta paikasta vyönsoljelle ❶! Tätä varten istuimen päällinen on avattava toiselta puolelta sen alle pääsemiseksi. Aseta lapsi sitten istuimeen ja varmista, että hänen lantionsa on selkänöjaa vasten.

Aseta vyöt nyt lapsen olkapäiden yli. Mikäli pituus ei riitä, nosta päällistä ❷ ja paina metalliosaa kevyesti, jolloin vöitä voidaan säätää olkapäiden alueella. Varo puristamasta vöitä liian voimakkaasti painamalla!


Työnnä sitten molemmat metallikiekket solkeen ❸ kunnes ne lukkituvat paikalleen kuuluvasti. Kiristä vyöt sitten vetämällä kapeasta hihnasta ❹, joka sijaitsee lapsen jalkojen välissä, kunnes tukeva asento on saavutettu.



3.1 Erillisten säätösolkien käyttäminen

Vaihtoehtoisesti on mahdollista kiristää vyö kahden erillisen säätösoljen avulla. Metalliosan ❷ painamisen sijasta painetaan vyönsäätimessä ❺ olevaa harmaata painiketta järjestelmän löysentämiseksi.

Sitten vedetään hihnan päästä voidaan säätämiseksi yksilöllisesti.

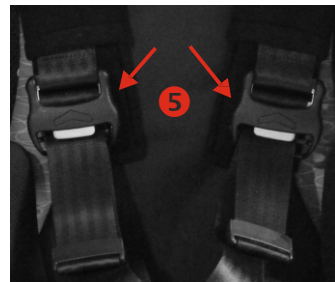

III. Perusistuimen käsittely ja toiminnot

3.2 Selkänojan korkeuden säätäminen

Paina kahvassa olevaa lukitussalppaa **1** päätuen siirtämiseksi ylös- tai alaspäin. Varmista, ettei lapsen pää milloinkaan ulotu päätuen yli!


Säädä 5-pistevyön poikittaisosa siten, että vyö kulkee vaakasuoraan – katso **3**! Avaa ruuviliitokset **2** molemmilta puolin. Kun korkeus on säädetty oikein, kiristä ruuvit uudelleen.



3.3 Selkänojan kallistuksen säätäminen

Selkänojaa on mahdollista säätää portaattomasti ja lukita se mihin tahansa asemaan. Tämä varmistaa autoistuimen tukevuuden kaikissa asennoissa. Avaa molemmat pikalukitsimet **1** ja siirrä selkänoja haluttuun asentoon.

Kulma lukitaan sitten pikalukitusvivoista.

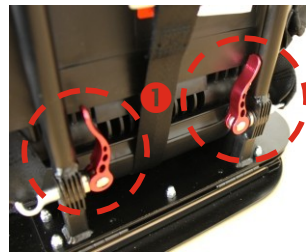

IV. Lisävarusteiden käyttäminen





4.1 ISOFIX-adapteri

Asentaminen:

1. Pyydä mekaanikkoa näyttämään istuimen asentaminen ja sen säätäminen.
2. Avaa säätöruuvit ❶ vasemmalla ja oikealla ja vedä kehikko ulos taaksepäin.
3. Säädä autoistuimen selkänöja haluttuun kulmaan auton selkänöjaan luotua tilaa hyödyntäen. Liu'uta ISOFIX-adapteria molemmilta puolin taaksepäin selkänöjaa kohti, kunnes kuulet molempien ISOFIX-kielekkeiden ❷ lukkiutuvan ajoneuvon ISOFIX-kiinnitysosiin (kaksi klikkausta).
4. Työnnä autoistuinta ajoneuvon selkänöjaa kohti, kunnes ne koskettavat toisiaan ja ovat sopivan tiukalla. Tämä estää värinää ajon aikana.
5. Kiristä molemmat säätöruuvit ❶ vasemmalla ja oikealla. Molemmat ISOFIX-kielekkeet on lisäksi suojattava tahattomalta avaamiselta; molemmat ruuvit ❸ on tämän vuoksi kiristettävä.
6. Varmista molempien ISOFIX-kielekkeiden lukittuminen molemmilta puolin vetämällä.

Irrotus:

1. Avaa molemmat ruuvit ❸.
2. Siirrä niitä eteenpäin autoistuinta kohden, samalla järjestelmän liitäntä avaten. Saattaa olla tarpeen kompensoida istuinpehmusteiden aiheuttama paine siten, että kiinnitys voidaan avata.
3. Autoistuin voidaan nyt poistaa ajoneuvosta.

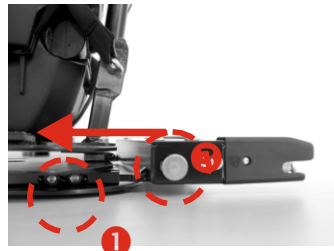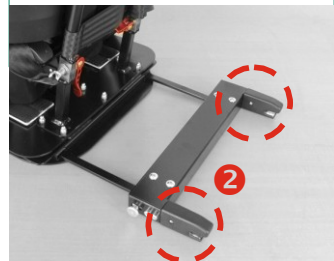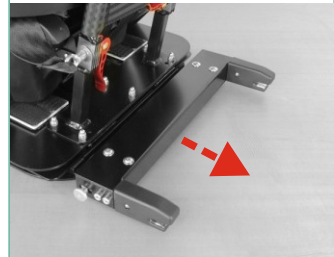
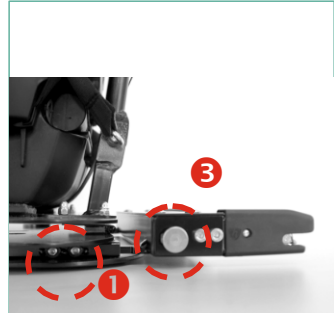


IV. Lisävarusteiden käyttäminen

4.2 Kiristystanko

Asentaminen:

1. Toimituksen yhteydessä tulee näyttää istuimen asentaminen ja sen säädöt.
2. Avaa säätöruuvit ❶ vasemmalla ja oikealla ja vedä kehikkoa taaksepäin.
3. Säädä autonistuimen selkänöja haluttuun kulmaan auton selkänöjaan luotua tilaa hyödyntäen. Paina kiristystankoa nyt molemmilta puolin taaksepäin selkänöjan suuntaan, kunnes se uppoaa autoistuimen ja istuinverhoilun väliin tukevasti.
4. Työnnä turvaistuinta ajoneuvon selkänöjaa vasten, kunnes se nojaa tiukasti selkänöjaan.
5. Kiristä molemmat säätöruuvit ❶ vasemmalla ja oikealla.
6. Tangon suuntautuminen ylöspäin tai alaspäin riippuu kulloinkin vastaavien ajoneuvon istuinten rakenteesta.

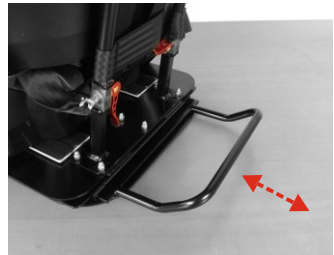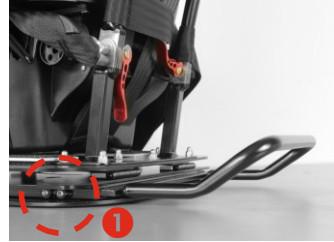

Irrotusta koskeva huomautus:

1. Vedä turvaistuin kiristystankoineen irti autonistuimen raosta.

IV. Lisävarusteiden käyttäminen

4.3 Turvapöytä

Asentaminen:

1. Toimituksen yhteydessä tulee näyttää istuimen asentaminen ja sen säädöt.
2. Aseta alusta ja suojapehmuste ❶ autoistuimeen lapsen istuessa siinä vöillä kiinnitettynä.
3. Kiinnitä pehmuste tarrahihnoilla ❷, jotka kiinnitetään autoistuimen selkänojaan.
4. Lapsen käsivarsien tulisi levätä pöydän päällä, mikä johtaa pystyyn istuma-asentoon. Tämä tukee ylävartaloa.



2. Varmista, etteivät verhoilun päällä olevat lelut pääse vahingoittamaan sitä. Älä käytä kovia tai teräväreunaisia esineitä!

4.4 Sivutuet

1. HERNIK GmbH ei salli poraus- tai ruuvinreikien tekemistä IPAI-NXT:n runkoon. Tästä huolimatta olemme katsoneet hyvin tärkeäksi tarjota sivutukia ❶ lapsille, joilla on heikot vartalolihakset. Päädyimme ratkaisuun, jossa käytetään tarrakiinnitystä, joka tarjoaa riittävän lujuuden ja samalla myös joustaa.



2. Tukityynyjen sijainnin muuttamiseksi ne on ensin varovasti irrotettava tarrakiinnitystä avaamalla. Tämän jälkeen tuki voidaan sijoittaa vapaasti.

TÄRKEÄÄ: Tukevan liitoksen aikaansaamiseksi tukea on painettava voimakkaasti ja samalla edestakaisin käännettäessä IPAI-NXT:n selkänojaa vasten.

Tarrapinnat saadaan näin pitämään paremmin!



IV. Lisävarusteiden käyttäminen


4.5 Loitonnuskiila

1. Loitonnuskiila **2** auttaa lasta yllä-pitämään ennalta määrätyn etäisyyden polvien välillä. Kiila on poistettava 5-pistevyön löysentämiseksi tai kiristämiseksi. Kiila irrotetaan avaamalla kiristin **1** ja vetämällä ylöspäin.
2. Kiilan tulisi olla istuinverhoilua vasten kuvassa esitetyllä tavalla. Kiilaa voidaan säätää syvyysuunnassa. Tätä varten molemmat kuusioruuvit on avattava istuimen alta ja siirrettävä.
3. Kiilaa tulee aina käyttää ajon aikana (mikäli valittu lisävarusteena), sillä kiinnitysosat voisivat muutoin vahingoittaa lasta.
4. Vivun **1** asentoa voidaan muuttaa vetämällä sitä kevyesti eteenpäin ruuviliitosta siirtämättä. Varmista, että se on ylhäällä ja pois tieltä siten, ettei se osu lapsen pohkeisiin.



4.6 Kallistussäätö

1. Mikäli ajoneuvon istuimen istuinkulma ei ole riittävä, kallistusta voidaan lisätä (laajennetulla) istuinkallistuksen säädöllä **1**. Tätä varten on avattava ruuvi **2** vasemmalla ja oikealla ja valittava toinen reikä. Tämän jälkeen ruuvit kiristetään uudelleen.
2. Pikalukitus ei ole tarjolla turvallisuussyistä!

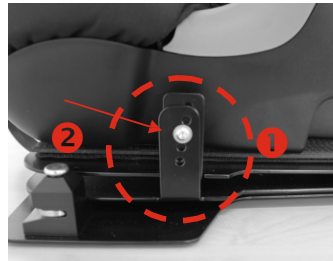

IV. Lisävarusteiden käyttäminen

4.7 Jalkatuki / jalkarulla

1. Liuskat **1** kiinnitetään autoistuimen alle pohjaosan säätöruuveilla siten, että säätäminen syvyysuunnassa on mahdollista.
2. Tankojen kulmaa voidaan muuttaa avaamalla pikalukitusvipu **2**. Tulee huolehtia siitä, etteivät vivut ole haitallisesti tiellä!
3. Jalkatuen korkeuden säätämiseksi on ruuvit **3** avattava vasemmalla ja oikealla puolella. Korkeus voidaan nyt valita portaattomasti. Tämän jälkeen ruuvit kiristetään uudelleen.



4.8 Sarana-adapteri

1. Päivittäisten ajoneuvoon siirtymisten helpottamiseksi suosittelemme sarana-adapteria, jonka avulla istuinta voidaan kääntää 90°. Teknisistä syistä VAIN yksi kääntösuunta on mahdollinen. Mikäli suuntaa halutaan myöhemmin vaihtaa, on istuin rakennettava uudelleen tehtaalla. ISOFIX-adaptoreiden tai kiristystangon käyttöä suositellaan!
2. Tuolin kääntämiseksi on vedettävä kahvasta **1** ylöspäin ja samalla käännettävä tuolia. Jalkatuen osumista auton etuistuimeen ja B-palkkiin on varottava.
3. Siirtymisen jälkeen IPAI-NXT käännetään takaisin lähtöasentoon siten, että kuuluu loksahdus kielekkeen **2** lukkiutuessa paikalleen.




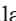

IV. Lisävarusteiden käyttäminen


4.9 Suojamatto

1. Matto sijoitetaan ajoneuvon istuimelle siten, että ISOFIX-liittimiin päästään edelleen käsiksi.
2. Aseta IPAI-NXT suojamaton keskelle ja kiinnitä luvussa 3.1 kuvatulla tavalla.



4.10 Rintakehähihnojen kiinnitysvyöt

1. Säädä vyö lapsen rinnan korkeudelle. Säilytä riittävä etäisyys kaulaan! Vyön liukumisen estämiseksi sisäpuolet on varustettu tarrapinnalla. Avaaminen tapahtuu sormin.
2. Vyön leveys säädetään nyt liukusoljen  avulla ja sitten vyönsolki  kiristetään. Hihnan vapaa pää kiinnitetään sitten liukusoljella  hihnan tahattoman löystymisen ehkäisemiseksi.

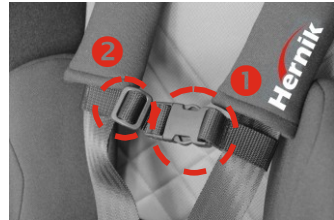

V. Takuu

Hernik-tuotteet on suunniteltu valmistettu tiukkoja laatustandardeja noudattaen. Mikäli teillä on poikkeuksellisessa tilanteessa aihetta valitukseen, on Hernik GmbH:n takuu voimassa seuraavin ehdoin:

- 24 kuukauden takuu toimituspäivästä kaikille kiinteille osille.
- 12 kuukauden takuu toimituspäivästä kaikille liikkuville osille.

Sellaisten osien osalta, jotka eivät ole Hernik GMBH:n valmistamia viittaamme vastaavan valmistajan takuukäytäntöihin (Römer-Britax Kindersicherheit GmbH). Tämän takuun alaiset vaatimukset edellyttävät, että väline on oikein asennettu ja sitä on käytetty annettujen ohjeiden mukaisesti.

Takuu mitätöityy, mikäli suoritetaan muutostöitä tai epäasianmukaisia korjaustoimenpiteitä ilman aiempaa konsultaatiota valmistajien kanssa. Takuu mitätöityy, mikäli väline on varustettu epäasianmukaisesti.

Muut vaatimukset, mistä tahansa laillisesta syystä johtuvat, etenkin suoria tai epäsuoria vahinkoja koskevat vaatimukset ovat poissuljettuja.

VI. Merkinnät

Istuimen takana on seuraavat merkinnät:



VI. Kunnossapito & hoito

7.1 Irrota päällinen





Ainoastaan alkuperäisiä BRITAX-RÖMER tai HERNIK-vaihtopäällisiä tulee käyttää, koska istuinpäällinen on turvaistuimen olennainen osa ja sillä on tärkeitä tehtäviä istuimen moitteettoman toiminnan kannalta. Vaihtopäällisiä on saatavissa jälleenmyyjältänne.

Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesuaineella pesukoneen hienopesuohjelmalla (30 °C). Päällisessä olevia pesuohjeita tulee noudattaa.

Muoviosat voidaan puhdistaa saippualla ja vedellä. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten liuottimia).

VAARA! Turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinpäällistä.

1. Siirrä autoistuimen päätuki ylimpään asentoonsa.
 2. Avaa selkänöjan (07) takana olevat koukut (20).
 3. Vedä päällisen yläosa pois.
 4. Avaa kiinnityslenkit (21) selkänöjan takaa (07).
 5. Irrota päällinen istuintyynystä (03) sekä päätuesta.
 6. Avaa kiinnityslenkit (21) päätuen takaa (05).
 7. Avaa koukut (20) selkänöjan etupuolelta (07).
 8. Vedä päätuen päällinen irti (05).
- Päällinen voidaan nyt pestä.

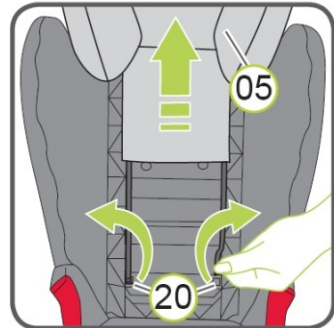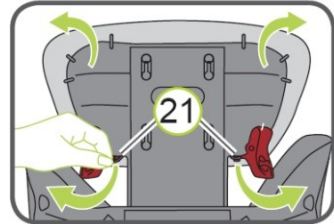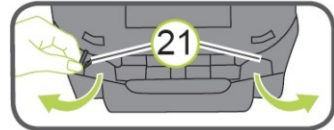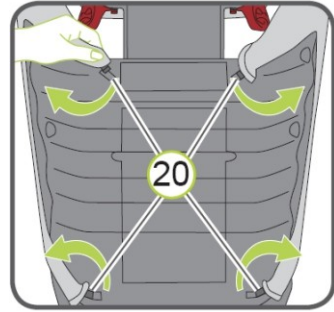

VII. Tekniset tiedot

	IPAI-NXT WITHOUT extra cushion	IPAI-NXT WITH extra cushion
SEAT WIDTH (pelvis)	31 cm	26 cm
SEAT WIDTH (knee)	34 cm	34 cm
SEAT DEPTH	30 cm	27 cm
BACK HEIGHT	41 - 54 cm	38 - 51 cm
CROWN HEIGHT	59 - 74 cm	56 - 71 cm
HEIGHT LATERALS	20 - 33 cm	17 - 30 cm
DISTANCE LATERALS	14 - 28 cm	
angle	85° - 160°	
total height	68 - 88 cm	
total width	51 cm	
total depth	42 cm	
weight	ab 7,0 kg	
capacity	36 kg	

Perusvarustus:

- 5-pistevyö solkipehmusteella (korkeussäädettävä!) ja vyönsuojuksilla
- Korkeussäädettävä päätuki
- miellyttävä selkänöjan ja päätuen pehmuste irrotettavalla päällisellä (muovautuva solumuovi!)
- kolmiosainen peruspäällinen, irrotettava ja pestävä 30 °C:ssa
- alumiini/teräsrakenne, sis. selkänöjan kallistussäädön ja tukevan aluslevyn; portaattomasti säädettävissä ja lukittava selkänöjan kulma



Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta

Timo Vihma, 040 060 1865, timo.vihma@finway.fi • Jari Korhonen, 040 550 4655, jari.korhonen@finway.fi



Hernik

HERNIK GmbH

Bodenseestrasse 25

83059 Kolbermoor • Germany

☎ +49 8031-2068044 • 📞 +49 8031-2069215

✉ info@hernik.de • 🌐 www.hernik.de