



TIMO

Be effective in postural care

ELLA

By  TIMO
Be effective in postural care

CODE

By  TIMO
Be effective in postural care

Jalkalaudat




Kallista teline vaaka-asentoon.
Tarkasta että jalkarautoissa on kiinni
tarvittavat osat kuten kuvassa.



Aseta jalkalauta paikoilleen ja kiinnitä se
pultin ja prikan avulla.
Huomioi että priikka tulee sijoittaa pultin
kannan ja jalkarautan väliin.
Tarkista että jalkalaudan remmit eivät jää
jalkalaudan ja jalkarautan väliin.

Polvituet

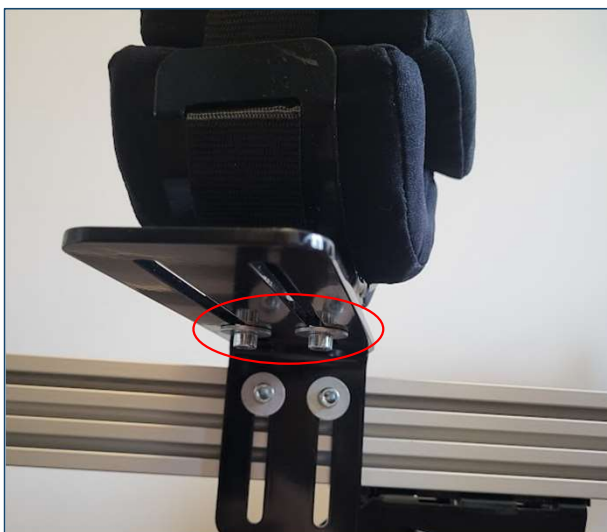

Kallista teline vaakatasoon.
Poista vanhat polvituet irrottamalla niitä kiinni
pitävät kaksi pulttia polvituen säätöraudan takaa.



Aseta uusi polvituki polvituen säätöraudan
etupuolelle.
Tässä kohtaa voit valita haluatko polvituen velcro- tai
solkikiinnityksen tulevan polven sisä- vai
ulkoreunalle.



Kiinnitä polvituki kahdella pultilla ja prikalla.
Huomioi että prikka tulee sijoittaa pultin kannan ja
polvituen säätöraudan väliin.

Polvituen rotaatiomoduuli



Kallista teline vaakatasoon.
Poista vanhat polvituet irrottamalla niitä kiinni pitävät
kaksi pulttia polvituen säätöraudan takaa.



Kiinnitä polvituen rotaatiomoduuli kahdella
pultilla polvitukeen.




Kiinnitä polvituki kahdella pultilla ja
prikalla.
Huomioi että priikka tulee sijoittaa pultin
kannan ja polvituen säätöraudan väliin.

4-in-1 tai 3-in-1 jälkiasennus



Kallista teline vaak asentoon.
Poista nykyiset polvi- ja jalkatuet, säätörautoineen, poistamalla pultit pystyrungosta.

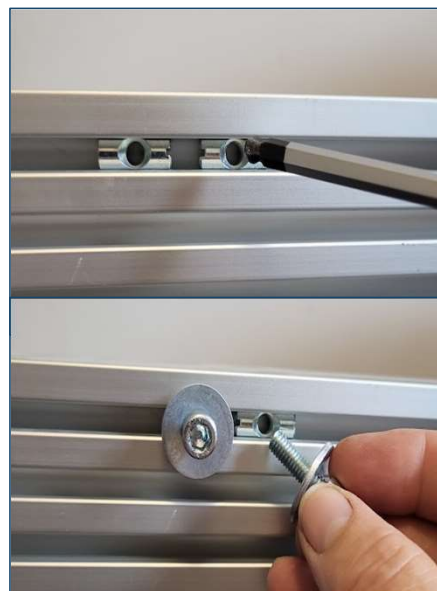

Tarkista että pystyrungon lukkomutterit ovat oikeassa asennossa ja aseta pultit takaisin paikoilleen, jotta lukkomutterit myös pysyvät oikeassa asennossa.




Poista ensimmäinen pultti lukkomutterista ja liu'uta toinen pultti-lukkomutteriyhdistelmä sivuun. Aseta uusi polvi- / jalkatuen säätörauta paikoilleen ja aseta pultti paikoilleen. Poista toinen pultti lukkomutterista ja liu'uta polvi- / jalkatuen säätörauta paikoilleen ja aseta toinen pultti paikoilleen. Toista sama toiselle puolelle.

Vartalogotuki, lantiotuki, ristiseläntuki



Aseta teline pystysuoraan asentoon ja poista päätuki.

Laske lantiotuki, mahdollinen ristiseläntuki ja vartalogotuki niin alas että pääset käsiksi pystyrungon yläosassa, etupuolella, olevaan pysäytinruuviin. Merkitse pysäytinruuvien paikka ja poista se 4mm kuusiokoloavaimella.

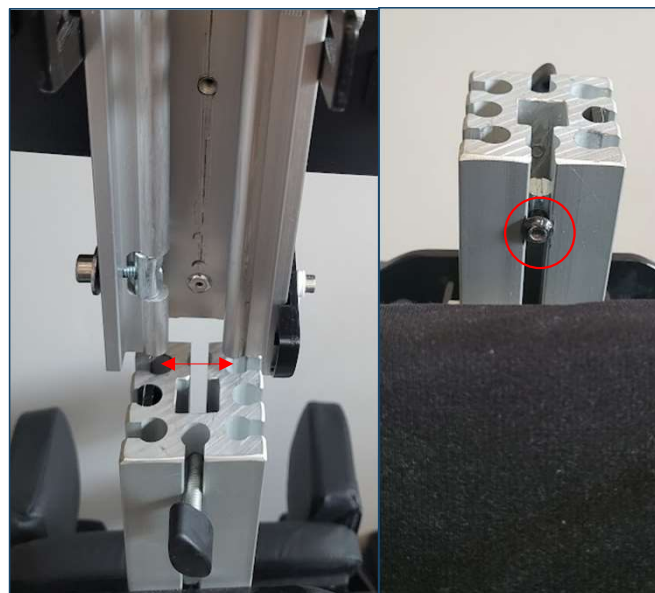


Liu'uta uusi / uudet tuet paikoilleen järjestyksessä: lantiotuki, mahdollinen ristiseläntuki, vartalogotuki.

Aseta pysäytinruuvi takaisin paikoilleen ja kiristä se paikalleen.

Vyö ilman sivutukia



Aseta teline pystysuoraan asentoon.
Aseta lukkokantalevy ja lukkokantapultit etupuolelta paikoilleen kuten kuvassa.

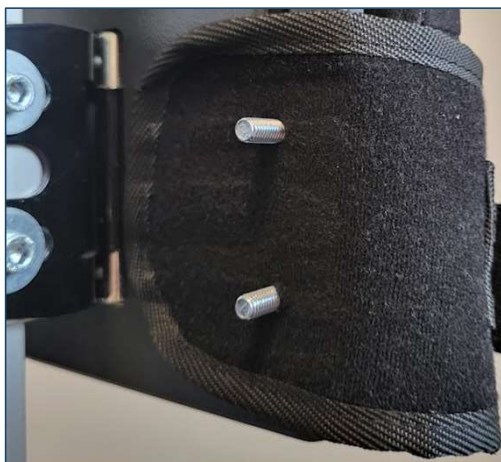

Aseta lukkokantapulttien päät vyössä olevien reikien läpi. Tarkista että vyö tulee oikein päin, solki ulos.



Kiinnitä vyö paikalleen käyttäen kahta priikkaa ja sormiruuvia. Toista sama toiselle puolelle.

Vyö ja sivutuet



Aseta teline pystysuoraan asentoon.
Aseta lukkokantalevy ja lukkokantapultit
etupuolelta paikoilleen kuten kuvassa.



Aseta lukkokantapulttien päät vyössä olevien reikien läpi.
Tarkista että vyö tulee oikein päin, solki ulos.
Aseta sivutuki paikoilleen vyön päälle siten että
lukkokantapulttien päät osuvat sivutuen uriin.



Kiinnitä vyö ja sivutuki paikalleen
käyttäen kahta priikkaa ja
sormiruuvia. Toista sama toiselle
puolelle.


Tray



Aseta teline pystyasentoon.
Poista päätuki ja päätuen säätöruuvi.



Liu'uta pöydän kannake telineen takapuolella
keskellä olevaan uraan.

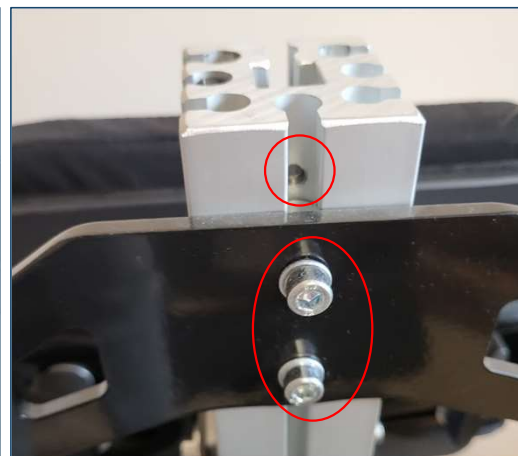

Kiristä pöydän kannakkeen pultit kun
kannake on haluamallasi korkeudella.
Aseta päätuen säätöruuvi takasin
paikalleen.

Päätuki


Pehmuste ja säätöraudat



Aseta teline pystysuoraan asentoon.
Poista olemassa oleva päätuki löysäämällä
päätuun säätöruuvia.
Liu'uta uusi päätuki säätörautoineen
paikoilleen ja kiristä säätöruuvi.

Päätuki

Timo pehmuste ja vaakaputki

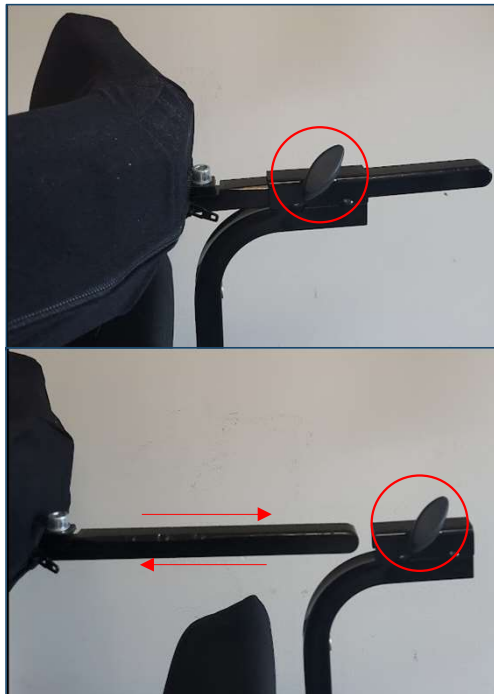

Löysää syvyyssäädön sormiruuvia ja
poista olemassa oleva päätuun
pehmuste ja vaakaputki.
Aseta uusi päätuki vaakaputkineen
paikoilleen ja kiristä syvyyssäädön ruuvi.

Päätuki

Whitmyer pehmuste
19mm kuula-adapterilla




Liu'uta musta
suojakaulus taakse.
Löysää kahta ruuvia
kiristysrenkaassa
vaihtaaksesi uuden
päätuun vanhan tilalle.

Hartiatuet



Hartiatukien asennukseen tarvittavat osat.
H-vyön kiinnikkeet toimitetaan aina hartiatukien yhteydessä.

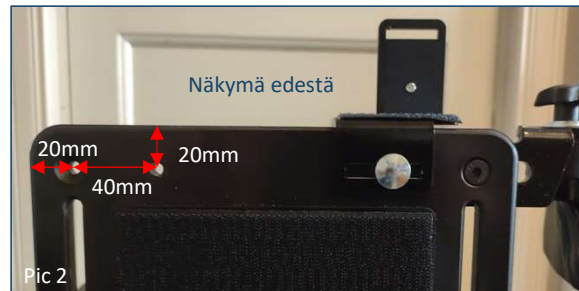

Tarvittavat reiät ovat selkälävynsä valmiina. Mikäli näin ei ole reikien paikat on ilmoitettu kuvassa.



Aseta musta ruuvi ulompaan reikään selkälävyn etupuolelta.
Aseta metallinen lukkokantapultti ja H-vyön kiinnike sisempään reikään selkälävyn etupuolelta.




Aseta hartiatuki paikoilleen, selkälävyn takaa, siten että mustan ruuvien ja metallisen lukkokantapulttien päät osuvat hartiatuen vaakasuoraan uraan.
Aseta sieniprikka ja levyprikka paikoilleen lukkokantapulttiin ja kiristä sormiruuvilla.
Aseta toinen sienimutteri paikoilleen mustaan ruuviin ja kiristä.




Tarkista toimivuus ja toista toiselle puolelle.

Kallistusindikaattori

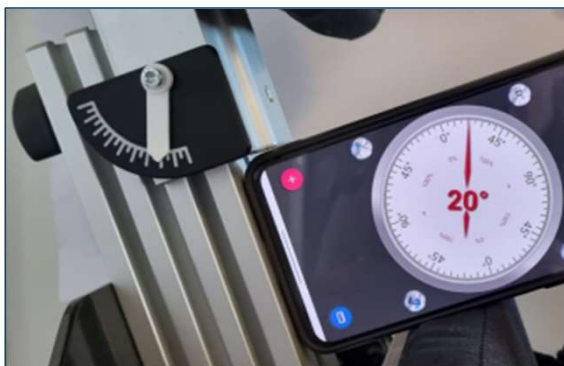


Kallistusindikaattorin jokainen pitkä viiva osoittaa 10° muutosta kallistuskulmassa. Kallistusväli on 0° - 90°.

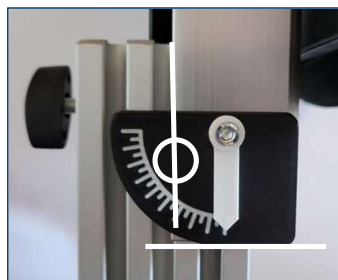

Kohdista indikaattorin alareuna liukupalan alareunan kanssa. Kohdista tarrapuolen kohdistin liukupalan vasemman reunan kanssa.




Poista tarran suojakalvo. Kiinnitä huomiota tarrapuolella olevaan kohdistimeen.

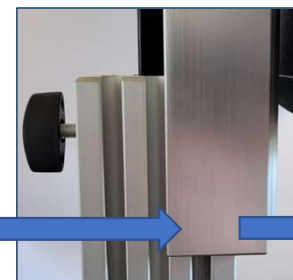

Kallistusindikaattori kiinnitetään tarralla vartalotuen alumiinisen liukupalan oikeaan alareunaan.



Mittanauha

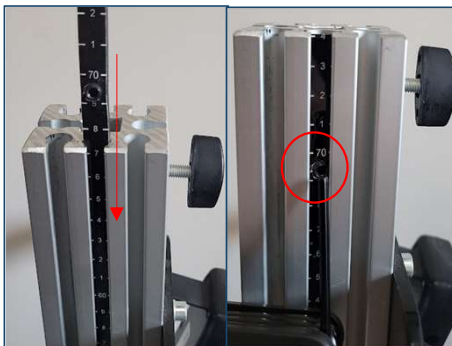

Aseta mittanauha paikoilleen telineen pystyrungon vasemmalla puolella olevaan keskimmäiseen uraan. Tasaa mittanauhan yläreuna keskirungon yläreunan kanssa. Kiristä mittanauhassa oleva ruuvi 4mm kuusiokoloavaimella.