

Asennusohjeet

B&S Auton turvajärjestelmä



- Auto-aanpassing
- Revalidatietechniek
- Mobiliteits- en hulpmiddelen

Onbeperkt in beweging.nl

Osat B&S Auton turvajärjestelmä

Perusvyö



Kiinnityssarja kiinteä istuin (H-kiinnitys)
(tarvitaan "kiinteän" istuimen kokoamiseksi)



7 lukkoinen asentovyö



Hihna perushihnan kellumisen estämiseksi
(tarvitaan "kiinteän" istuimen kokoamiseksi)



Liitäntähihnat



Turvavyön leikkuri hätätilanteessa
(versio voi vaihdella vaihtelevan tarjouksen vuoksi)



Turvasuljin tappilukolla



Lukittava lukitusolki



Lainsäädäntö ja turvallisuus

Mitä tulee lasten kuljettamiseen, suosittelemme tutustumaan soveltuviin lakeihin ja määräyksiin.



Käytettäessä B&S Car asentovyötä auton turvavyön käyttö on pakollista.



B&S Car asentovyön käyttö on aina omalla vastuullasi.



Lukitse lukittavat sivulukitusoljet vain, jos se on todella välttämätöntä.



Suosittelimme (etenkin kolmansien osapuolten käyttäessä) sovittamaan kaikkien asianosaisten kanssa, että henkilöä kuljetetaan B&S Car asentovyöllä.



Suosittelimme vahvasti mukana toimitetun turvavyönleikkurin asentamista autoon/taksiin (bussiin).

Lukittavat sivusoljet



Kiristä lukon soljet vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä! Yritä jonkin ajan kuluttua, voitko vapauttaa osan tai kaikki seitsemästä soljesta.

Turvasuljin tappilukoilla



Onko B&S-asentovyö muovilukituksella ja tappilukot? Varmista, että mukana toimitettu kynä on kuljettajan ja/tai avustajan ulottuvilla!

CE-merkintä



Vakuutamme täten, että B&S Car asentovyö on lääketieteellisen tuotteen vastaavien sääntöjen ja ohjeen 93/42EEG mukainen.

Huolto



B&S-auton asentovyö voidaan puhdistaa kevyesti kostealla liinalla. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita äläkä pese niitä pesukoneessa!


Käytä yhdessä lastenistuimen kanssa

B&S-auton asentovyötä voidaan käyttää yhdessä korokeistuimen kanssa. Tämän on oltava korokeistuin ilman selkänojaa. On tietysti tärkeää, että pidät asentovyön oikealla korkeudella. Haaravyö joka menee jalkojen väliin. Tämän täytyy kulkea lastenistuimen takaa



Turvavyön avaamisen estä

Kun autossa oleva henkilö avaa itsenäisesti auton oman turvavyön.

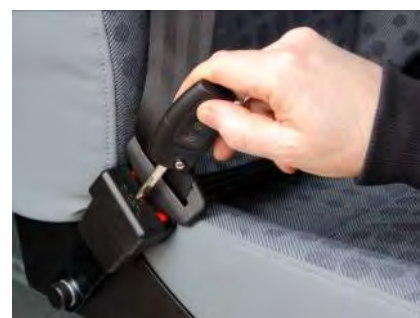

Huomion oikeaan säätöön

On tärkeää, että asentovyö on asetettu oikein. Varmista, että asentovyön ja perusvyön väliset hihnat on säädetty oikean pituiseksi, eivät liian löysät eivätkä liian kireät. Asentovyö on oltava siinä istuvan henkilön kannalta mukava.

Käytä aina auton turvavyötä.

Pass the shoulder straps through the correct passage.

Pujota olkahihnat oikean käytävän läpi.

Kainalon tasolla olevat kiinnityskohdat sijaitsevat kainalossa.

Kiinnityspisteet lonkassa sijaitsevat lantiolla



Asennus vakioistuim

Aseta perusvyö auton istuimen/takaistuimen selkänojan päälle (1). Tarvittaessa käännä takaistuin väliaikaisesti alas. Perusvyö asetetaan istuimen ja selkänojan väliin (3) ja niskatuen tappien (2) kautta. Jos asentovyötä käytetään pitkille lapsille, perusvyö asennetaan niskatuen yli.

Kiristä kaksi kiinnityshihnaa (A). Kaksi turvasuljinta on selkänojan takapuolella (2).

Kiinnitä asentovyö perusvyöhön seitsemällä muovisella sivulukitusoljella/turvasulkimella, joissa on neulalukitus.

Säädä kiinnityshihnojen pituus matkustajan mittojen mukaan. Kun asetettu oikeaan kokoon, varmista, että kiinnität hihnat niin, etteivät ne luista (4).



Käytä lopuksi aina auton turvavyötä.



Asennus valmis "kiinteä" istuin

Aseta perusvyö selkänöjan päälle ja vyöt auton istuimen/takaistuimen (5) istuimen päälle.

Mukana oleva 'kiinnityssarja kiinteä istuin' kiristetään istuimen päällä oleviin hihnoihin (5/8/A). Liitoshihnat (8/B) sijoitetaan istuimen jalkojen väliin. Vyöt on kiinnitetty selkänöjan takaosaan turvasulkimen (6/C) vastaanottavaan osaan. Jos mahdollista, perusvyö voidaan sijoittaa niskatuen tappien (6) läpi.

Mukana oleva "kellumisen estävä vyö" (6/7/D) on kiinnitettävä istuinkulmaan istuimen ympärille. Tämä estää perusvyön "kellumisen" istuimen yläpuolella.

HUOM. Seitsemäs piste on tämän "keljumisen estävän vyön" takana (7/E). Sitten istuimen yli/alta selkänöjan takaosassa olevaan sulkimeen (6/F).

Kiinnitä asentovyö perusvyöhön seitsemällä muovisella sivulukitussojella/turvasulkimella, joissa on neulalukitus. Säädä kiinnityshihnojen pituus matkustajan mittojen mukaan. Kun asetat oikeaan kokoon, varmista, että kiinnittät hihnät niin, etteivät ne luista (9).



Käytä lopuksi aina auton turvavyötä .



Parhaat autoilun apuvälineet asiantuntijalta

Timo Vihma +358 40 060 1865 • Jari Korhonen +358 40 550 4655 • Antti Oinas +358 44 783 3041

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@finway.fi