

Installationsanvisningar

B&S Bilsäkerhetssystem



- Auto-aanpassing
- Revalidatietechniek
- Mobiliteits- en hulpmiddelen

Onbeperkt in beweging.nl

Reservdelar B&S Bilsäkerhetssystem

Grundläggande bälte



Monteringssats fast sits (H-fixering)

(krävs för montering för att komplettera "fast" sits)



7-ordlekars fasthållningsväst



Rem för att förhindra att grundremmen svävar

(krävs för montering för att komplettera "fast" sits)



Sätt extra förbindningsremmar



Nödbältesklippare

(versionen kan variera på grund av varierande erbjudande)



Säkerhetslås med stiftlås



Låsbart sidospänne



Lagstiftning och säkerhet

När det gäller transport av barn rekommenderar vi att du läser gällande lagar och förordningar.



När B&S bilsäkerhetssystem används är användning av vanligt 3-punktsbälte obligatorisk.



Användningen av B&S bilsäkerhetssystem sker alltid på egen risk.



Lås endast de låsbara sidospännena om det verkligen är nödvändigt.



Vi rekommenderar (särskilt när det används av tredje part) att samordna med alla inblandade parter att en person transporteras med ett B&S Car-säkerhetssystem.



Vi rekommenderar starkt att den medföljande bältesklipparen monteras i bilen/taxien (bussen).

Låsbara spännen på sidan



Dra endast åt låsspännena när det är absolut nödvändigt! Försök efter en stund om det är möjligt att lossa några eller alla sju spännen.

Säkerhetsstängning med stiftlås



Är B&S bilsäkerhetssystem försett med säkerhetslås med stift? Se till att den medföljande pennan finns inom räckhåll för föraren och/eller följeslagaren!

CE-märkning



Härmed försäkrar vi att B&S bilsäkerhetssystem överensstämmer med motsvarande regler för den medicinska produkten och riktlinjen 93/42EEG.

Underhåll



B&S bilsäkerhetssystem kan rengöras med en lätt fuktig trasa. Använd inte aggressiva rengöringsprodukter och tvätta dem inte i tvättmaskin!

Använd i kombination med bältesstol

B&S bilsäkerhetssystem kan användas i kombination med en bälteskudde. Detta måste vara en bälteskudde utan ryggstöd. Det är naturligtvis viktigt att du håller säkerhetsvästen på rätt höjd.

En extra punkt att uppmärksamma är den sjunde punkten, bältet som går mellan benen. Detta måste gå bakom bältesstolen!



Valfritt säkerhetsbälte

När en person i bilen självständigt öppnar spännet på det obligatoriska 3-punktsbältet uppstår en farlig situation.

Förebygg detta med ett skydd för insättningspunkten.



Punkter att uppmärksamma korrekt justering

Det är viktigt att säkerhetsbältet är korrekt inställt. Se till att anslutningsremmarna mellan säkerhetsvästen och grundbältet är justerade till rätt längd, inte för lösa och absolut inte för hårt.

Bältessystemet måste vara bekvämt för personen som sitter i det.


Använd alltid standard säkerhetsbälte för säker och lagligt tillåten transport!

För axelremmarna genom rätt passage.

Se till att omskoningsvästen är inte monterad för högt.

Fästpunkter i armhålans höjd är placerade vid armhålans.

Fästpunkter vid höften är placerade vid höften.

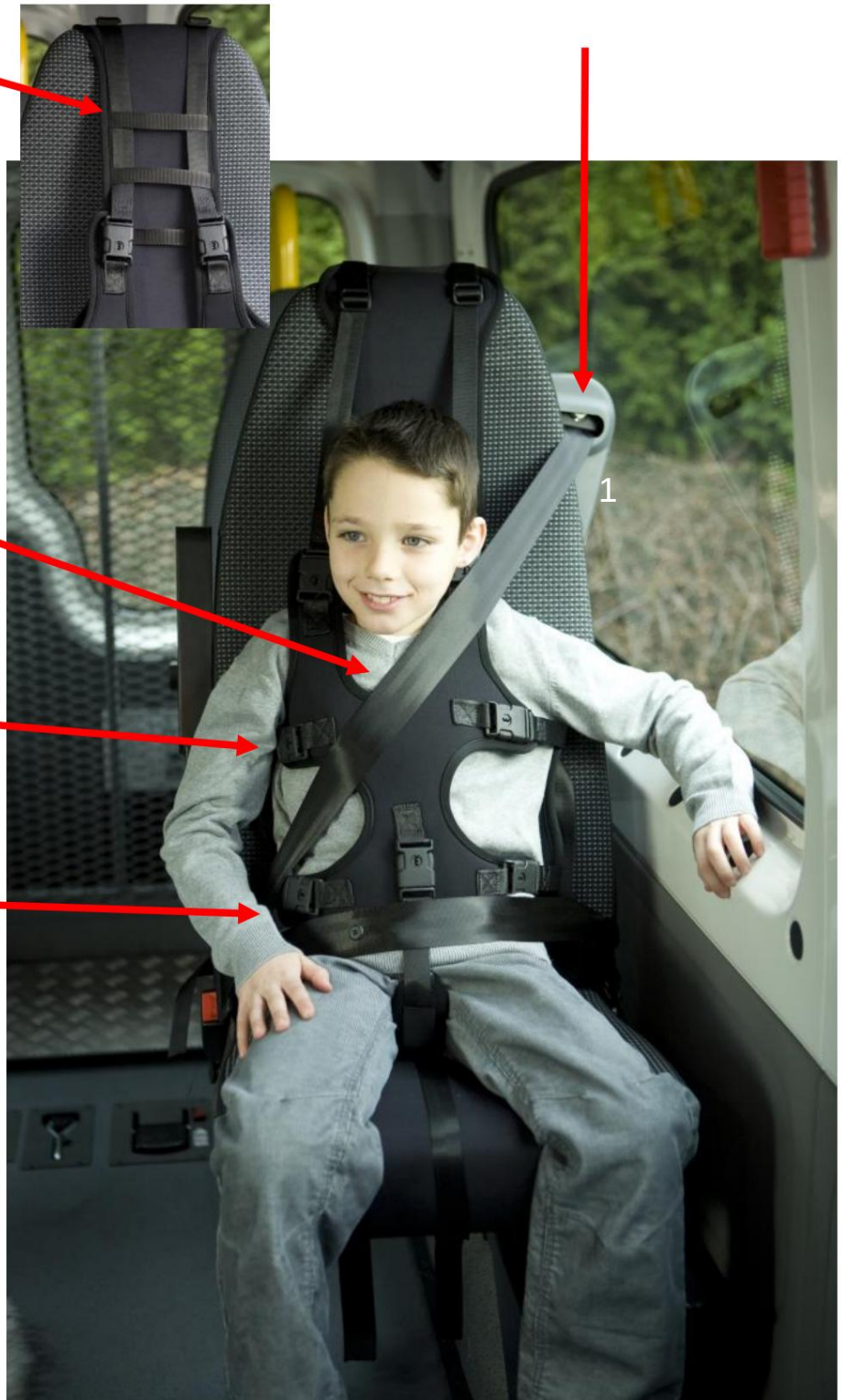

Montering av standardsäte

Placera basbältet över ryggstödet på bilbarnstolen/baksätet (1). Fäll ner baksätet tillfälligt vid behov. Basbältet förs in mellan sits och ryggstöd (3) och genom stiften på nackstödet (2). Om säkerhetsbältet används för längre barn monteras basbältet tvärs över nackstödet.

Dra åt de två säkerhetsremmarna (A). De två säkerhetsspännena sitter på baksidan av ryggstödet (2).

Fäst säkerhetsvästen vid grundbältet med hjälp av de sju plastspännena/säkerhetsspännena i plast med sprintlås. Anpassa längden på anslutningsremmarna till passagerarens mått. När de är inställda på rätt storlek, se till att säkra remmarna så att de inte glider (4).



Använd slutligen alltid standardsäkerhetsbältet för säker och lagligt tillåten transport av passageraren i bilen!



Montering komplett 'fast' sits

Placera grundbältet över ryggstödet och bältena över bilbarnstolens/baksätets säte (5).

Det medföljande 'monteringssetet för fast sits' dras åt på bältena som sitter över sitsen (5/8/A). Fästremmarna (8/B) placeras mellan sitsbenen. Bältena fästs på ryggstödet baksida vid säkerhetsspännets (6/C) mottagningsdel. Om möjligt kan grundbältet placeras genom nackstödet (6) stiften.

Det medföljande "bältet för att förhindra att bältet flyter" (6/7/D) behöver fästas vid sittvinkeln runt sitsen. Detta förhindrar att det grundläggande bältet "flyter" ovanför sitsen.

OBS. Den sjunde punkten är bakom detta 'bälte för att förhindra att barnet svävar' (7/E). Sedan över/under sitsen till stängningen baktill på ryggstödet (6/F).

Fäst säkerhetsvästen vid grundbältet med hjälp av de sju plastspännena/säkerhetsstängningarna i plast med sprintlås. Anpassa längden på anslutningsremmarna till passagerarens mått. När de är inställda på rätt storlek, se till att säkra remmarna så att de inte glider (9).



Använd slutligen alltid standardsäkerhetsbältet för säker och lagligt tillåten transport av passageraren i bilen!


5



6



7

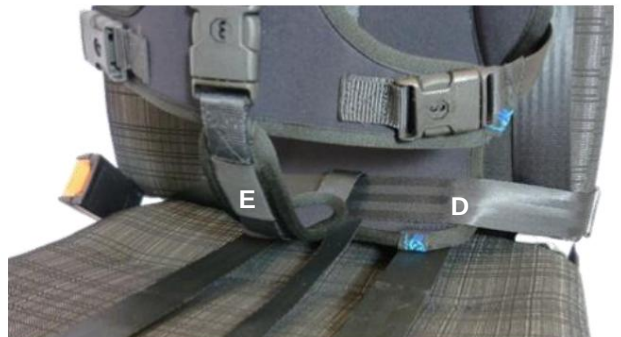

8



9



Mer än 40 år av obegränsad frihet...

B&S är ett väletablerat företag, specialiserat på att öka och underhålla
autonomi för funktionshindrade personer genom att ge dem sin rörlighet. Den nuvarande marknaden
B&S position uppstod tack vare enorm expertis inom bilanpassningar och utveckling
av rehabiliteringsprodukter som specialanpassade rullstolar och sitsar. Vårt individuella tillvägagångssätt
och rådgivning är grunden för att skapa bästa möjliga matchning mellan produkt och användare.
Därför är utveckling vår kärnverksamhet, eftersom alla är unika.

Vårt helhetsperspektiv gör att du kan nå ditt mål att vara obegränsad inom
mobilitet och självförsörjning. B&S är importör, återförsäljare och tillverkare av det bästa
Rehabiliteringsprodukter finns tillgängliga. Från käpp eller rullstol till en helt anpassad
bil, B&S ger dig "Obegränsad frihet".



Kathodeweg 5
1627 LK HOORN
Telefon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Xenonvägen 7A
3812 SZ AMERSFOORT
Telefon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl